

EURUS



<https://dental.takarabelmont.co.jp/>



Nombres de componentes
Dental Unit & Chair : EURUS
Dental Unit : EURUS UNIT
Dental Chair : EURUS CONTOUR CHAIR /
EURUS FOLDING LEGREST CHAIR
Dental Light : EURUS LIGHT



E U R U S

Nombrado en honor al Viento del Este, que trajo lluvia bendita a los campos de cereales en la mitología antigua, Eurus encarna nuestra creencia de llevar productos de calidad japonesa altamente confiables a los dentistas de todo el mundo.





Suave y Relajado

Sillón

El mecanismo hidráulico garantiza un movimiento suave y silencioso de las articulaciones y proporciona una sensación de comodidad a los pacientes. El nuevo sistema de reposacabezas de doble eje, capaz de realizar una amplia gama de ajustes, se puede ajustar en incrementos de 7,5 grados, acomodando a pacientes desde niños hasta adultos. La altura del reposacabezas se puede ajustar con facilidad, requiriendo solo la mitad de la fuerza necesaria en los modelos anteriores, más cómodo para el dentista/asistente dental al ajustar el sillón a la comodidad del paciente (pendiente de patente).

Contorno: Baja altura inicial; Capacidad de carga de 200 kg para el modelo de estilo básico

Reposapiés plegable: Fácil montaje y desmontaje para niños, ancianos y pacientes en silla de ruedas; fácil para que el dentista/asistente dental examine la dentadura del paciente desde la posición de las 6 en punto; y adecuado para la terapia de ortodoncia.



Reposabrazos abatible

Los reposabrazos están diseñados con una longitud y forma que facilitan la sujeción de los pacientes y el mecanismo de rotación lateral ayuda a los pacientes de edad avanzada a subir y bajar del sillón con facilidad.



Control de palanca del sillón

El sillón dental se puede manipular completamente de manera higiénica, intuitiva y con manos libres mediante el uso del pie del operador (patente en trámite).



Cabezal electrónico **Opción**

El recorrido completo de 120 mm y el ángulo del cuello se pueden ajustar fácilmente sin imponer una tensión excesiva al paciente. El reposacabezas motorizado se puede manipular con los interruptores de pie, lo que permite una operación higiénica de manos libres. Dado que los interruptores de palanca a los pies del operador permiten el ajuste de manos libres del ángulo y la altura del reposacabezas, lo que permite que toda la operación sea muy higiénica.

Bajo a alto

Soporte de brazo

El rango de movimiento vertical de la mesa es de 525 a 1505 mm para el tipo de contorno y de 715 a 1275 mm para el tipo de pedestal. La mesa está sostenida por un brazo flexible, que se puede mover con una fuerza un 50% más ligera que los modelos anteriores.



Mango adecuado para la operación del panel táctil
El mango está diseñado no solo para un movimiento fácil de agarrar y mover, sino también para proporcionar una posición de descanso para la mano para reducir el estrés y garantizar un funcionamiento confiable del panel táctil.



Posición del soporte
El soporte, diseñado para ser independiente de la mesa, se puede ajustar libremente con un mecanismo de ajuste de tres ejes para la posición más adecuada para cada dentista.



* La imagen de instalación para la especificación para zurdos.



Siéntase Ligero, Menos Fatiga

Con varillas de 900 mm de longitud, el sistema de entrega facilita que el dentista/asistente dental trate a los pacientes desde la dirección de las 8 en punto. Las mangueras son livianas y flexibles para reducir la carga sobre las muñecas del dentista/asistente dental que administra el tratamiento durante muchas horas.

De largo alcance

El largo alcance de 900 mm permite que el dentista/asistente dental trate a los pacientes fácilmente desde la posición del pecho, así como desde la posición lateral del sillón dental, lo que lo hace adaptable a varios estilos de tratamiento.

Soporte flexible

El rodillo guía en el extremo de la varilla puede girar hacia la izquierda y hacia la derecha, guiando la manguera de la pieza de mano con menos fricción para una postura de tratamiento cómoda incluso cuando el dentista/asistente dental está colocado lejos de ella.

Ajuste de tensión

La tensión se puede ajustar para cambiar el peso de cada pieza de mano para reducir la carga sobre la mano del dentista en el rango de cero a extensión completa (pendiente de patente).




Liberarse del peso

Soporte en el lugar

El dentista/asistente dental puede tomar una pieza de mano y comenzar a tratar a los pacientes de inmediato sin necesidad de volver a sujetar la pieza de mano. Dado que la guía de rodillos soporta el peso de la manguera, el dentista/asistente dental se libera de la carga desde el hombro hasta la mano. No necesitan volver a mirar el marcador de posición al devolver la pieza de mano.

Guía de manguera

El suave movimiento de rodadura del rodillo libera al dentista/asistente dental del peso de la manguera cuando extrae una pieza de mano. Este diseño le ayuda a administrar el tratamiento durante un período prolongado sin sentir demasiada tensión.

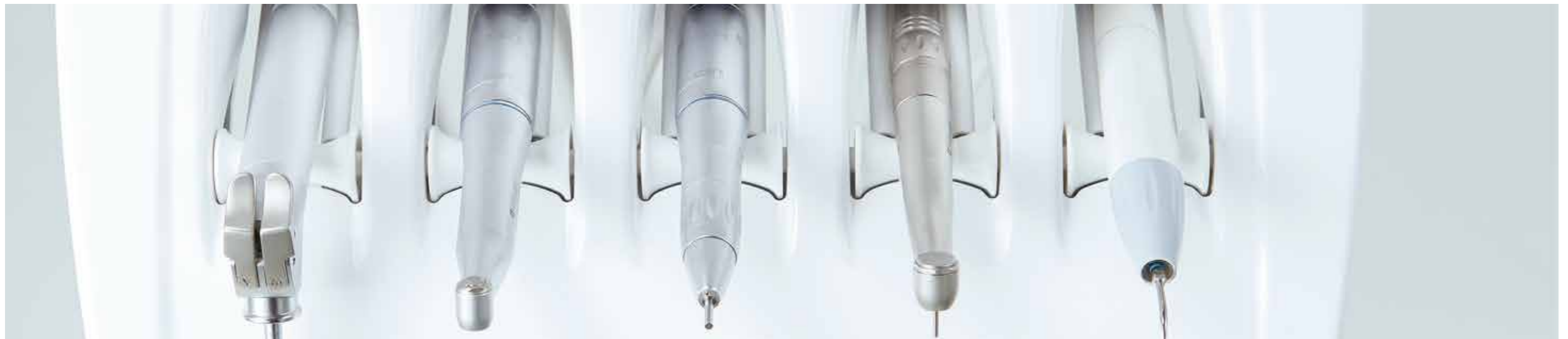



Ajuste su posición

Suporte del asistente

La bandeja ancha del soporte del asistente está diseñada para que el asistente tenga suficiente espacio de trabajo con una eficiencia de trabajo mejorada. El sillón dental y el llenador de vasos también se pueden operar desde el lado del asistente. El soporte del asistente puede acomodar un máximo de cuatro piezas de mano.



Sistema de interruptor de seguridad

El interruptor de seguridad detecta una sobrecarga en el brazo auxiliar y evita la interferencia con objetos, como taburetes, lo que garantiza un alto nivel de seguridad.



Tipo trinquete **Opción**

Como opción, el brazo auxiliar viene con un mecanismo de ajuste de altura de carrera de 170 mm, para que el dentista/asistente dental pueda alcanzar las piezas de mano con facilidad incluso durante el tratamiento con dos manos.

Proporcionar calidad

Escupidera

El espacio interior se ha ampliado para una escupidera de gran capacidad. Con el sistema de limpieza de agua y el separador, se puede mantener un alto nivel de higiene.



Indicador **Opción**

Como opción, la unidad del sillón viene con un indicador de seguridad que muestra los estados de bloqueo del sillón dental y las piezas de mano de una manera fácil de ver, lo que ayuda al dentista/asistente dental a conocer intuitivamente el estado de la unidad.

Sistema de vacío **Opción**

Como opción, la unidad de silla viene con un sistema de vacío cuya succión se ha incrementado en un 185%, proporcionando una succión rápida y confiable. El sistema se puede adaptar para aspiradoras gemelas, lo que debería resultar útil para los procedimientos quirúrgicos.

*Comparación de nuestros productos convencionales bajo nuestras condiciones.





Toca tu estilo

Interfaz

La interfaz ha sido diseñada para mejorar la eficiencia y reducir el estrés durante el tratamiento. Cuando se elige y recoge una pieza de mano, la pantalla muestra solo la información necesaria, lo que ayuda al dentista a concentrarse en el tratamiento.



Motor

La pantalla de configuración para motores de piezas de mano capaz de almacenar cuatro configuraciones diferentes permite una operación intuitiva. Las rpm, el torque y la dirección de rotación se pueden elegir con un toque en la pantalla.



Escarificador

Desde la pantalla de configuración de la pieza de mano, se pueden elegir los modos de tratamiento (periodoncia, endodoncia y escarificador) con un solo toque en la pantalla.

Espacio compacto

Espacio de trabajo

La unidad de silla de diseño compacto se puede instalar en un espacio tan estrecho como 1,8 m de ancho para aprovechar al máximo sus capacidades, lo que permite suficiente espacio de trabajo para el tratamiento con dos y cuatro manos. El sobrebrazo está preparado para el tratamiento tanto en posición de pie como sentado. El dentista/asistente dental puede administrar eficientemente el tratamiento desde varias orientaciones desde las 8 en punto hasta las 2 en punto.



Dos manos

El largo alcance y el ligero movimiento del brazo facilitan que el tratamiento a dos manos se administre sin estrés.



Cuatro manos

En posición a cuatro manos, el gran tablero proporciona un espacio común para el odontólogo y el asistente, lo que facilita un tratamiento fluido.



Brillante y amable

Dispositivo de iluminación

Es el dispositivo de iluminación LED de próxima generación (conforme a ISO9680), capaz de emitir luz con intensidad variable de 5.000 a 34.000 luxes, y que reproduce la luz natural con una capacidad de rendimiento de color altamente funcional. Con el sensor sin contacto, se puede encender y apagar la luz y ajustar el modo seguro para el composite.



Iluminación flexible

El brazo de resorte Belmont permite mover la luz y fijarla en el lugar exacto que se desea para que el dentista/asistente dental pueda comenzar el tratamiento sin demora. El brazo cubre un área amplia, incluso las áreas maxilar y mandibular del paciente, para una iluminación suficiente.



Operación lateral

Un nuevo controlador de pie deslizante permite un ajuste fino mediante la posición lateral y la acción de pisar. Las rpm máximas se pueden configurar para la pieza de mano de una manera rápida e intuitiva.

Control preciso

Pedal

El controlador de pie es compacto y altamente funcional, lo que permite encender y apagar el chorro de agua dental o el soplado de virutas de la pieza de mano sin usar las manos. Como opción, el controlador está disponible con tecnología inalámbrica.

*El cable para el controlador de pie inalámbrico está incluido.

Rendimiento de limpieza mejorado

Se mantiene limpio

La condición higiénica dentro de la unidad de silla se mantiene mediante el lavado de la línea de agua, de modo que se pueda administrar un tratamiento amigable para el paciente. Como opción respetuosa con el medio ambiente, la unidad viene con un separador o un separador con colector de amalgama, lo que ayuda a reducir facilitando el mantenimiento diario.



Desmontaje del portamangueras
Las partes finales de la varilla se pueden desmontar fácilmente para su limpieza.



Soporte esterilizable en autoclave **Opción**
Las salidas del odontólogo y las salidas del asistente pueden esterilizarse en autoclave y separarse para su limpieza.



Componentes de luz desmontables **Opción**
La cubierta de la lente y el mango de la luz esterilizable en autoclave se pueden quitar con una sola palanca para facilitar la limpieza.



Cuenco desmontable
El cuenco de cerámica se puede desmontar fácilmente para limpiarlo y, por lo tanto, siempre puede estar limpio.



Botella de agua **Opción**



Escupidera
La tapa corredera de la escupidera facilita el mantenimiento diario.



Sistema de lavado **Opción**
El sistema de lavado integrado de la pieza de mano inhibe la acumulación de biopelículas y el crecimiento bacteriano en las mangueras de las piezas de mano.



Sistema de limpieza de línea de vacío **Opción**
El uso diario del sistema integrado de limpieza por succión evita la acumulación de residuos en la línea de vacío y ayuda a mantener una succión constante.

Comodidad

Taburete

El taburete va bien con Eurus. El asiento y el respaldo se pueden ajustar en altura e inclinación.
(El taburete del asistente solo tiene una función de inclinación del respaldo.)

Satisface las necesidades de varios estilos de tratamiento.

Con el asiento y el respaldo en forma de cubo, el taburete está preparado para un tratamiento durante largos períodos. Con una altura inicial baja, el taburete satisface las necesidades de varios estilos de tratamiento.
















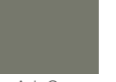









Variaciones de color









Color de cuero

Los colores vienen en cuatro temas: Warm, Cool, Earth y Vitamin. Cualquier elección de estos colores para el cuero debe coincidir con la decoración interior de su clínica. La tapicería se puede elegir entre sin costuras, con costuras y tipo de lujo.

[Con y sin costuras]

Warm Color	 Coral Pink / ES20	 Light Pink / ES30	 Beige / ES21	 Camel / ES14	 Bordeaux / ES12	 Black / ES8
Cool Color	 Mint Blue / ES5	 Indigo Blue / ES25	 Light Blue / ES16	 Purple / ES26	 Light Gray / ES33	 Gray Teal / ES28
Earth Color	 Rose / ES34	 Mauve / ES27	 Forest / ES31	 Aldo Blue / ES23	 Ash Gray / ES32	 Chocolate / ES11
Vitamin Color	 Scarlet Red / ES24	 Mandarin Orange / ES22	 Lemon Yellow / ES2	 Yellow Green / ES18	 Sky Blue / ES7	 Blue / ES29

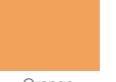[Luxury]

 Black / SH1	 Dark Blue / SH9	 Maroon / SH7	 England Green / SH18	 Orange / SH22	 Camel / SH10
 Mustard Yellow / SH6	 Ivory / SH15				

E U R U S

Se pueden elegir entre una amplia gama de productos.

Variaciones

Con los conceptos de diseño limpio, tierno y ergonómico, la serie Eurus ofrece una amplia selección de taburetes, sillones dentales y mesas dentales para adaptarse a las necesidades de cada individuo. Nos enorgullecemos de fabricar productos que buscan la facilidad en la administración del tratamiento no solo por los dentistas sino también por sus asistentes y para la comodidad de los pacientes.



S1

[Sillón]
Silla de contorno
[Tipo de montaje]
Montaje en silla sobre el paciente/
Carro de montaje de silla
[Tipo]
Colgante/En lugar/
Continental•colibrí (solo sobre el paciente)
[Lámpara]
Montaje de la unidad Luz LED
La especificación para zurdos está disponible.



S3

[Sillón]
Silla de contorno
[Tipo de montaje]
Pedestal sobre el paciente/
Carro de pedestal
[Tipo]
Colgante/En lugar/
Continental•colibrí (solo sobre el paciente)
[Lámpara]
Montaje de la unidad Luz LED
La especificación para zurdos está disponible.



S4

[Sillón]
Silla plegable con reposapiernas
[Tipo de montaje]
Pedestal sobre el paciente/
Carro de pedestal
[Tipo]
Colgante/En lugar/
Continental•colibrí (solo sobre el paciente)
[Lámpara]
Montaje de la unidad Luz LED
La especificación para zurdos está disponible.



*Tenga en cuenta que la imagen de este catálogo puede diferir del producto real.